



Návod k použití

BioNette™

Revolučně nový prostředek určený k léčbě alergické rýmy. **BioNette™** poskytuje úlevu a efektivně zabraňuje symptomům spojeným s alergickou rýmou jako například: svědění hlavy, svědění očí, uší a nosu, slzení, kýchání, rýma, bolení hlavy a slzící oči. Léčba není ani chemická ani farmakologická a nemá žádné známé vedlejší účinky. Léčba je založena na principu fototerapie (léčba pomocí světelné energie).

Zdravotnický prostředek **BioNette™** používá nízkenergetickou světelnou technologii v úzkém pásmu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Každá léčebná cyklus trvá (přibližně) 4,5 minuty. Doporučená četnost použití je dvakrát až třikrát denně. Pro dosažení maximálního efektu a optimální úlevy je doporučeno zahájit používání **BioNette™** okamžitě po výskytu prvních příznaků rýmy. Jakmile pozorujete zlepšení, četnost použití může být postupně snižována dle potřeby až do úplného ukončení.

BioNette™ je drobný přístroj, který se vejde do každé i té nejmenší kapsy.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Prosím odstraňte tenký průhledný obal z baterie.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Stlačte a držte obě gumová tlačítka po stranách přístroje. Dvě průhledné špičky začnou svítit červeným světlem.
- Ujistěte se, že červené světlo svítí nepřetržitě a neblíká.
- Obě špičky vložte do nosu za stálého stlačení obou gumových tlačítek.
- Uvolněte obě gumová tlačítka.
- Léčba je ukončena, když se červené světlo automaticky ukončí přibližně po 4,5 minutách. (Jakmile

je přístroj aktivován, nemůže být vypnut před vypršením automatického léčebného cyklu)


- Pokračujte vyčistěním přístroje, jak je popsáno dale v návodu.
- Doporučená četnost použití je 2-3krát denně.
- Účinnost se může zvýšit s opakovaným použitím.

Pozor:

- Dohled rodičů je nutný při použití u dětí.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla.
- Držte z dosahu dětí.

VÝMĚNA BATERIÍ

Balení BioNette obsahuje 2 vysoko kvalitní lithiové baterie CR2032 (3V). Vysuňte držák na baterie a vložte baterie ve správné pozici podle obrázku č.1.

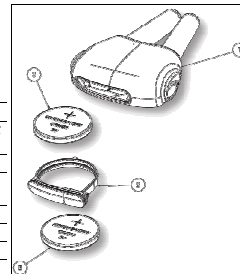

Obrázek č.1.
Výměna baterií.

TECHNICKÁ DATA

Světelná léčba	Úzký pás 630 nm světla
Světelná energie	Minimálně 10.0 mW (+/-20%) na každou nosní dírku
Energetická dávka	2.7 J
Časovač	Stlačením tlačítka se zapne. Automaticky vypne po přibližně 4.5 minutách.
Přesnost časovače	+/- 15% odchylka
Zdroj energie	2X CR2032 (3v)
Napájecí proud (Max)	0.03A
Výdrž baterie	Až 80 léčebných cyklů
Indikace vybité baterie	Aktivní LED blíká
Váha	18 g s baterií
Rozměry	52x38x15 mm

ZNÁMÉ INTERAKCE

Nejdou známy žádné interakce při použití přístroje spolu s farmakologickou medikací. BioNette™ může být používáno ve spojení s jinou medikací jako například s orálními antihistaminiky, kortikosteroidy nebo s medikací bránící ucpaní nosu.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

S používáním přístroje nejsou spjaty žádné známé nežádoucí účinky. Lidé trpící těžkou formou alergické rýmy mohou používat **BioNette™** častěji než 3krát denně bez obav z nežádoucích účinků.

ČIŠTĚNÍ

Čištění: Zdroj světla by měl být čištěn mírným čisticím roztokem pomocí jemného vlhkého hadříku.

BioNette™ nesmí být nikdy ponořeno do vody.

Sterilizace: Doporučujeme čistit zdroj světla pomocí hadříku namočeného v 70% alkoholu.

Hygiena: Udržujte maximální hygienické podmínky při použití přístroje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možný důvod	Řešení/Akce
Červené světlo se nerozsvítí	Baterie jsou staré nebo vybité	Vyměňte baterie
	Baterie nebyly vloženy správně	Vyměňte baterie
Červené světlo bliká	BioNette nefunguje	Pokud výše uvedené řešení nevyřešilo Váš problém, prosím kontaktujte lokálního prodejce.
	Baterie jsou slabé	Vyměňte baterie

OMEZENÍ ZÁRUKY VÝROBCEM

Záruka je vystavena kupujícímu a zajišťuje, že je výrobek bez materiálových a funkčních závad. Záruka je platná dva roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na opravu nebo bezplatnou výměnu náhradních dílů. Je na posouzení výrobce, zda k poškození došlo při normálním použití přístroje a zda bylo zařízení používáno v souladu s pokyny výrobce.

POZORNOST!
Nedívejte se přímo do zdroje světla.
Dohled rodičů je nutný při použití dětmi.

ZÁRUKA NEBUDE UZNÁNA V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH:

- Nesprávné použití.
- Oprava neprovedená výrobcem nebo výrobcem oficiálně delegovaným zástupcem.
- Náhodné poškození nebo rozbíjení.
- Poškození použitím nevhodných baterií.



Symbols on the package

	Upozornění musí být přesně dodrženo.		Autorizovaný zástupce v Evropské Unii
	Výrobce		Podívejte se do návodu k použití
	Typ "BF" IEC 60601-1		Datum výroby

	WEEE – Elektrické a elektronické vybavení		
--	---	--	--



Výrobní licence: BioLight Medical Devices (HK) Ltd
2nd Floor, Hong Kong Trade Center, 161-167 Des Voeux Road, Central, HK



Changzhou BioLight Medical Devices Co. Ltd **CE0123**
Hall 329, Building 3, Sanjing World Technology
No.18, Huashan Road, Xinbei District, Chanzhou 213022, Jiangsu, China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Tel:+49-40-2513175/2513178; Fax:+ 49-40-255726

Výroba je certifikována: ISO 13485 (2012), MDD 2007/47 EEC (2007).

Technologie a indikace fototerapie jsou patentovány.

Přístroj BioNette je celosvětově patentován.

BioNette™ je registrovaná obchodní značka.

Version 420.00.01. (rev 05 CZ 02) Date 30-01-2018

Vyrobeno v Číně

